



DAX Ytdesinfektion Extra

Ytdesinfektion



DAX Ytdesinfektion Extra består av ca 45 vol% isopropylalkohol, tensid (smutslösande) samt korrosionsinhibitor (förhindrar rost) och är avsedd för desinfektion av släta ytor, t.ex. undersökningsbriksar, bänkar, bord och metallföremål. Produkten är effektiv mot bakterier, svamp och höljeförsedda virus som t.ex. Corona, Hepatit b & C samt HIV. Verkar snabbt och avdunstar utan att lämna spår på den behandlade ytan.

Mikrobiologisk information:

EN13727 (baktericidal effekt) 60 sek

EN13697 (baktericidal/jästicid effekt) 60 sek

EN13624 (jästicidal effekt) 5 min

EN14476 (Vacciniavirus/höljeförsedda virus) 30 sek, (Adenovirus 5 min)

*Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning

Användningsområde	För desinfektion inom hälso- och sjukvården, tandvården och djursjukvården.
Produktegenskaper	Har dokumenterad effekt på bakterier, svampar och höljeförsedda virus som t.ex Corona Innehåller korrosionsskydd Består av ipa och har 45 volymprocent alkoholstyrka Verkar snabbt och avdunstar utan att lämna spår efter sig på den behandlade ytan eller på metallföremålet Tillsatsen av tensid som smutslösare gör att ytan inte behöver förbehandlas
Bruksanvisning	Tillsatsen av tensid som smutslösare gör att ytan inte behöver förbehandlas Gör såhär Ytor • Dränk in en torkduk med utspädd brukslösning alternativt spruta direkt på ytan. • Bearbeta ytan upprepade gånger. • Lämna ytan lätt fuktig i slutet av inverkningstiden och låt lufttorka. Metallföremål (ej CE-märkt) • Torka bort organiskt material såsom t.ex. blod från föremålet. • Lägg ner föremålet i utspädd medel och låt ligga i minst 1 minut. • Använd så mycket ytdesinfektionsmedel att ytan är fuktig under hela kontakttiden (se etiketten för kontakttider)
Förvaring	Förvaras i rumstemperatur, stäng kapsylen efter användning. Hållbar 3 år från produktion.
Tillverkningsland	SVERIGE

**Förpackningsvolym / Transport krt.
Artikelnr.****Artikelnr.****GTIN****GTIN (krt)**

12 x 1 l

470-12

7331964004708

7331964904701

3 x 3 l

471-3

7331964004715

7331964904718

**Ytterligare
information**

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.